

Bruksanvisning:

7. Sätt fast det icke-sterila skuminlägget (AR-1615) till överarmsställningen.

8. Sätt fast den autoklaverbara fingerdistractionstillsatsen (AR-1614, säljs separat).

9. Valfritt: Använd traktionsvägstillsatsen (AR-1604, säljs separat), mellan fingerdistractionstillsatsen och kabeln.

Sätt fast vikter till kabeländan nederst på den vertikala upprättstående balken.

BRUKSANVISNING

(AR-1611S)

ARTHREX HANDLED- STRAKTIONS- ENHET



Montering



Arthrex, Inc.
1370 Creekside Boulevard,
Naples, Florida 34108-1945 USA
Tel.: 800-934-4404 • www.arthrex.com


Arthrex GmbH
Erwin-Hielscher-Strasse 9
81249 München, Tyskland
Tel.: +49 89 909005-0 • www.arthrex.de



Handledens traktionsenhet underlättar arroskopisk kirurgi av handleden genom att hålla armen i ett läge som är bekvämt för patienten, liksom även lättåtkomligt för kirurgen. Traktionskrafter kontrollerar handledsdistraction, genom de sterila fingersnarorna, genom att använda vikter som anbringas på huvudbomkabeln. Förutom att tillhandahålla en mottraktionskraft, kommer överarmsställningens stötta att hjälpa till att hålla ett stabilt läge för handleden vid operativa ingrepp t.ex. reduktion av distala radiusfrakturer och fixering med stift eller extern fixering. Den röntgengenomskinliga handstabiliserande stötten är fullständigt justerbar för att hålla handleden stadigt i alla lägen från hel pronation till hel supination.


Den röntgengenomskinliga handstabiliserande monteringen med stötta kan avlägsnas från huvudvärstangen för autoklavering. Läget för överarmsställningens stötta och den röntgengenomskinliga handstabiliserande stötten kan justeras medan patienten befinner sig i liggande ställning. *Obs! Överarmsställningen och skuminlägget är icke-sterila och måste draperas under kirurgi.*

Sterila fingersnaror säkras på önskat vis och krokas upp på den triangulära fingerdistractionstillsatsen. Traktionsvikter anbringas därefter till en kabel som är fästad till fingerdistractionstillsatsens distala ände.

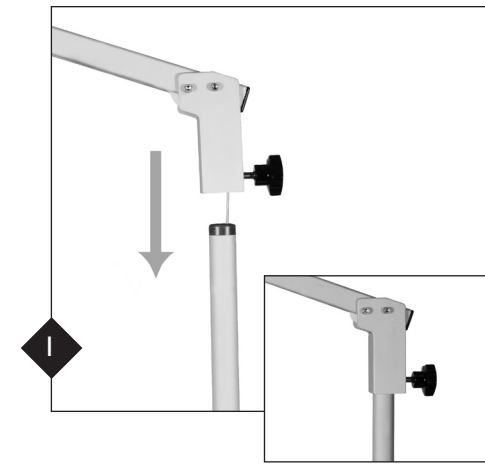


Bruksanvisning:


1. Låt bomkabeln glida ned in i den vertikalt upprättstående balken. För balken upp och innanför bommens gångjärn.

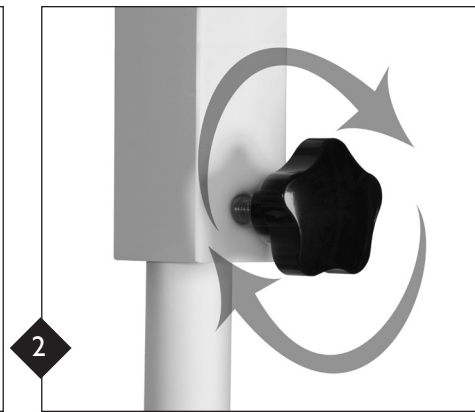


2. När monteringen är klar, sväng bommen till önskat radially läge och vrid vredet medsols för att låsa fast läget.

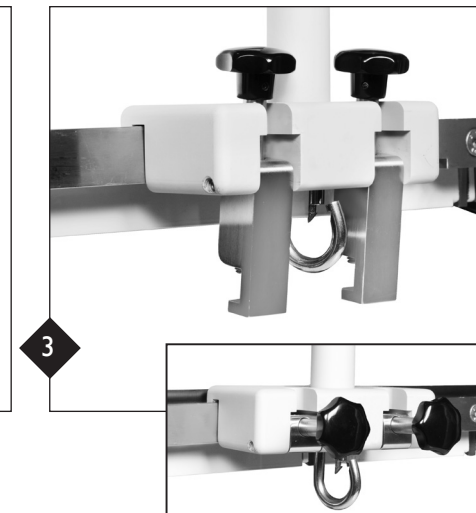


3. Placera Clark-skenadapters övre kant över Clark-skenan. Knäpp upp basgaffeln och dra åt de två vreden för stadig fixering till Clark-skenan.

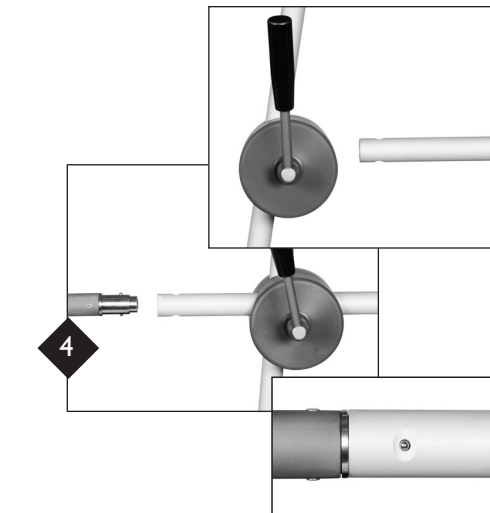

4. För in den autoklaverbara, röntgengenomskinliga handstabiliserande stötten i den justerbara horisontella armen. Under införandet, säkerställ att de två snäppknapparna är i linje med de motsvarande hålen i den horisontella justeringsarmen. Stötten kommer att snäppa in i den horisontella justerbara armen. Se Arthrex DFU-0023 för anvisningar om autoklavering.

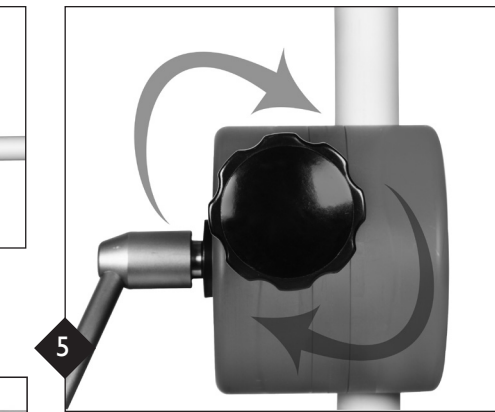

5. Dra åt vredet i medsols riktning för att låsa stötten in i den justerbara horisontella armen.

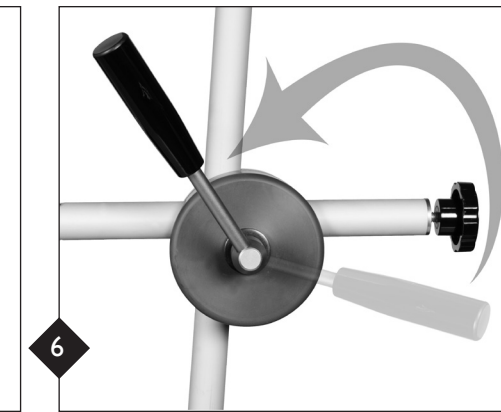

6. Lossa justeringshandtagen motsols och justera armarna till det önskade läget. Båda armarna kan justeras in eller ut, upp eller ned, och sida till sida. *Obs! Spakarnas läge är justerbart genom att placera din tumme på skruvstötten, dra ut spaken från stötten, och vända spaken till vänster eller till höger.*