

## BRUKSANVISNING

Kasserbar delad returelektrod med kabel  
för vuxen  
(AR-9610SGP)





**Arthrex, Inc.**  
1370 Creekside Boulevard  
Naples, Florida 34108-1945 USA  
800-934-4404 • Fax: 800-643-9310  
www.arthrex.com

**Arthrex GmbH**  
Erwin-Hielscher-Strasse 9  
81249 München, Tyskland  
Tel.: +49 89 909005-0  
www.arthrex.de



© 2012, Arthrex Inc.  
Med ensamrätt. LAI9610, Rev. 2



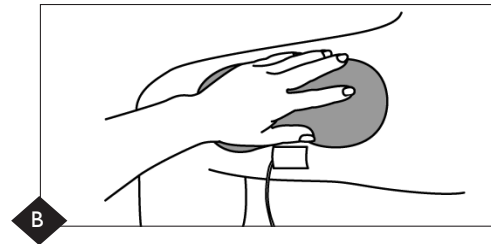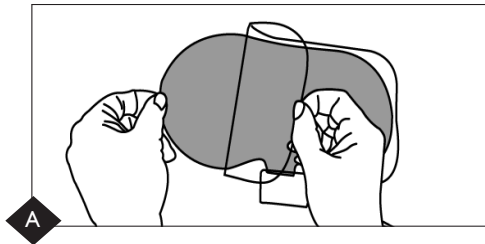

**Bruksanvisning:**

Förbered elektrodappliceringsområdet på patienten. Välj ett jämnt, rikligt vaskulariserat muskelområde så nära operationsstället som möjligt för placering av dynan.

A. Öppna förpackningen och ta ut elektroden.

B. Avlägsna elektrod mellanlägget fullständigt och applicera elektroden. Använd ett jämnt stadigt tryck för att säkerställa fullständig patientkontakt.

Applicera elektroden med den långa sladdlösa sidan vänd mot operationsstället. Sätt på generatoren för att säkerställa korrekt funktion. Anslut returelektrodens sladd till generatoren. Avlägsna elektroden långsamt för att undvika hudirritation.

**Försiktighetsåtgärder:**

1. Om patienten omplaceras efter elektrodapplicering, säkerställ att elektroden förblir i fullständig kontakt med patienten och att sladden är korrekt ansluten.
  2. Säkerställ att det inte föreligger några veck i elektroden.
  3. Elektroden får INTE förvärmas.
  4. Avlägsna eller omplacera INTE elektroden efter initial applicering.
  5. Elektroden får INTE återanvändas.
  6. För att minimera risken för elektrokirurgiska brännskador måste hår avlägsnas före placering av dynan.
  7. Använd inte elektroden om dynan är missfärgad eller utgången.
  8. Använd inte smörjande gel på elektroden.
  9. Undvik att använda en varm filt på patienten.
  10. Använd inte elektrolytlösning.
  11. Avlägsna elektroden långsamt för att undvika hudirritation.
  12. Inget latex är använt vid tillverkningsprocessen.
- Enligt federal lagstiftning (USA) får denna produkt endast säljas av läkare eller på läkares ordination.

